

PORT DU MASQUE RESPIRATOIRE JETABLE DE TYPE N-95 EN CONTEXTE D'INONDATION

*Travaux d'inspection ou d'enlèvement
de matériaux avec des moisissures*

Bonnes pratiques

- s'assurer que le masque porte l'inscription NIOSH N-95
- s'assurer que le masque est de la bonne grandeur, du bon modèle et bien ajusté pour chaque travailleur
- avoir le visage bien rasé là où le masque entre en contact avec la peau
- avant chaque utilisation du masque, vérifier s'il est bien positionné et procéder à un test d'étanchéité (voir ci-dessous)
- changer le masque s'il rend la respiration trop difficile, s'il devient humide ou s'il est endommagé

Utilisation du masque

- s'assurer que le masque recouvre complètement le menton et le nez
- placer l'attache supérieure sur le dessus de la tête et l'attache inférieure sur la nuque, sous les oreilles; les attaches ne doivent pas se croiser
- s'assurer que le masque et la pince nasale (si le masque en possède une) adhèrent bien aux joues et au nez
- faire un test d'étanchéité (voir ci-dessous)
- jeter le masque après usage
- se laver les mains



Photos reproduites avec l'autorisation de l'ASSTAS

Test d'étanchéité

Le test d'étanchéité permet de s'assurer que le masque est bien étanche au visage. Il doit être fait à chaque utilisation. Pour faire un test d'étanchéité :



Photo reproduite avec
l'autorisation de l'ASSTAS

- placer les deux mains par-dessus le masque sans l'écraser (il faut éviter de le déformer) pour percevoir les fuites d'air
- expirer ou inspirer
- s'il y a une fuite d'air autour du nez, du menton ou sur les joues, repositionner le masque jusqu'à ce qu'il n'y ait aucune fuite d'air

L'employeur a l'obligation de fournir gratuitement les équipements de protection individuels