

Note de service

DESTINATAIRES : Aux utilisateurs des services des laboratoires du CISSS de la Montérégie Centre

EXPÉDITEUR : Dominique Savard
Coordonnatrice clinico-administrative des laboratoires
Direction régionale des laboratoires

Alexandre Gauvin
Chef de Service des achats et de la performance de
l'approvisionnement
Direction de la logistique

DATE : Le 14 mars 2023

OBJET : Changement de tubes de prélèvement pour analyses urinaires en biochimie et en microbiologie

À compter du 9 mai 2023, débutera le changement des tubes pour le prélèvement d'échantillons destinés aux analyses urinaires de biochimie et de microbiologie à la suite d'un changement de fournisseur. La compagnie sera dorénavant Beckman-Dickinson (BD).





Ce changement s'effectue dans un souci d'amélioration continue de la qualité et contribuera à offrir un délai de conservation plus long et à l'harmonisation régionale des produits d'approvisionnement et de la pratique.

Voici les changements à noter :

- Nous changeons le contenant primaire de collecte urinaire et ferons l'ajout de tubes de transport spécifiques aux tests de laboratoire associés à la chimie urinaire, l'analyse d'urine et la culture d'urine;
- Le contenant primaire de prélèvement ne servira uniquement qu'à la collecte de l'urine, IL NE DOIT PAS être transporté au laboratoire à l'exception des prélèvements intra-hospitalier ayant un volume inférieur au volume minimal requis;
- Le volume minimal requis lorsque toutes les analyses doivent être effectuées est d'environ 50 ml. Tout prélèvement ayant un volume de moins de 50 ml sera rejeté à l'exception des prélèvements pédiatrique, intra-hospitalier et usager avec trouble de la miction, pour lesquels il y aura une priorisation des analyses.
- Par la suite, le travailleur de la santé transfère l'urine dans chacun des tubes de transport sous vide requis selon les analyses prescrites en utilisant le dispositif

prévu à cet effet inclus dans le couvercle du contenant primaire. Il n'y aura aucun transvidage manuel;

- Il est nécessaire d'inverser 8 à 10 fois les tubes de transport à la suite du remplissage, afin de bien mélanger les agents de conservation ;
- Seuls les tubes d'analyses peuvent être transportés au laboratoire :
- Un ordre de remplissage doit être respecté (Voir tableau ci bas);

Ordre de remplissage	Produits	# Catalogue	# GRM CENTRE	Délai de conservation
1	Contenant de collection 120 ml	 BD364941	344079	Contenant de prélèvement
2	Culture urinaire Microbiologie Sans agent de conservation	 BD366408	135070	2 heures : T° pièce 24 heures : 2 à 8° C
3	Chimie urinaire Biochimie Sans agent de conservation	 BD366408	135070	Dépend de l'analyse; Se référer au répertoire des analyses de biologie médicale.
4	Analyse urinaire Biochimie 8 ml Avec agent de conservation	 BD364992	344080	8 heures : T° pièce

Le répertoire des analyses ainsi que les étiquettes imprimables seront mis à jour au moment du changement. Nous vous invitons fortement à consulter ces deux sources d'information à votre disposition. Voir les liens des répertoires ci-bas :

Hôpital Charles-Le Moyne

[Personnel à l'interne de l'Hôpital Charles-Le Moyne](#)

[Personnel à l'externe de l'Hôpital Charles-Le Moyne](#)

Hôpital du Haut-Richelieu

[Personnel à l'interne de l'Hôpital du Haut-Richelieu](#)

[Personnel à l'externe de l'Hôpital du Haut-Richelieu](#)

Le changement s'effectuera sur tous les sites de la Montérégie. Voici le calendrier d'implantation pour les établissements du CISSSMC :

CISSSMC	Date d'implantation
Hôpital Charles-Lemoyne/établissements associés	9 mai 2023
Hôpital du Haut Richelieu/établissements associés	9 mai 2023

L'instruction à l'usager ainsi que l'instruction aux travailleurs de la santé vous seront acheminées ultérieurement.

Si vous avez des questions concernant l'utilisation des nouveaux contenants et tubes, veuillez contacter le laboratoire de votre établissement.

Pour toute question sur la distribution des nouveaux contenants et tubes, n'hésitez pas à contacter le service de l'entreposage et de la distribution de votre établissement.

Merci de votre précieuse collaboration.